



Patientvåg WPT

Så här använder ni vågen:

Gå upp och ställ er på vågen. Stå så still som möjligt. När värdet är stabilt printas en lapp ut med er vikt.

Om säng eller rullstol används under vägning gäller samma sak. Först när stabilt värde erhålls printas en lapp med vikten ut.

Om rullstolen ska frigöras under vägningen är det bra om den som hjälper patienten ser till att viktvärdet så länge stolen och ev. medhjälpare befinner sig på vågplattan förblir ostabilt tills endast patienten själv står på plattan. Enklast är egentligen att medhjälparen rör sig lite så värdet "fladdrar".

Detta är för att endast patientens vikt ska printas ut dvs. utan rullstol och medhjälparen.