



Förpackningen innehåller

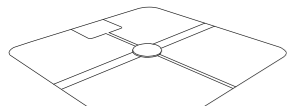


Withings anslutna
våg



USB-kabel

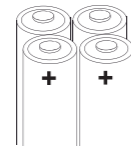

4 AAA
batterier

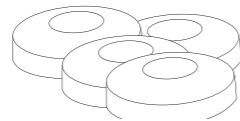

4 fötter
för användning på matta

Hårdvarukrav




Dator eller iPhone



Wifi Internet tillträdespunkt
(router)

Viktigt meddelande om säkerhet

-  Denna produkt är inte lämplig för personer med Pacemaker eller annan hjärtstimulator.
- Data från Withings våg är endast avsedda som vägledande värden och inte som medicinskt utlåtande.
- Rådgör med din läkare innan du fattar beslut om en ändring av dieten eller fysisk aktivitet.
- Använd inte vågen på våta golv eller med våta fötter där du kan halka och ramlas omkull.
- Stå inte på vågens kanter men så nära mitten som möjligt.




Denna enhet uppfyller kraven enligt part 15 i FCC's regelverk. Användandet är underställt följande två villkor: (1) Denna enhet får inte förorsaka skadlig störning, och (2) Denna enhet ska motstå mottagen störning i alla former inklusive störning som kan medföra oönskad funktion.

Copyright Withings © 2009.
Samtliga rättigheter förbehålles.
Mångfaldigande och distribution är förbjuden utan skriftligt medgivande från Withings.
Apple och iPhone är registrerade varumärken (*) som tillhör Apple Computer, Inc.



Att komma igång Whitings anslutna våg

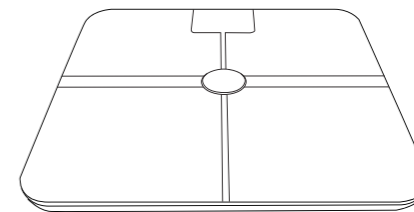


Gratulerar till köpet! Med Withings anslutna våg kommer du att kontrollera din kondition över lång tid genom att förenkla din tillvaro. Alla vägningar kommer att finnas tillgängliga på din personliga webbskärm. Denna vägledning kommer att hjälpa dig komma igång och upptäcka alla dess fördelar på bara några få minuter.

Withings

Uppstartning


Att sätta i batterierna

1. Vänd först vågen upp och ner och lägg den försiktigt på en plan yta så att den inte repas.
2. Öppna locket på vågens undersida och sätt i de 4 medföljande batterierna. Var noga med polariteterna.

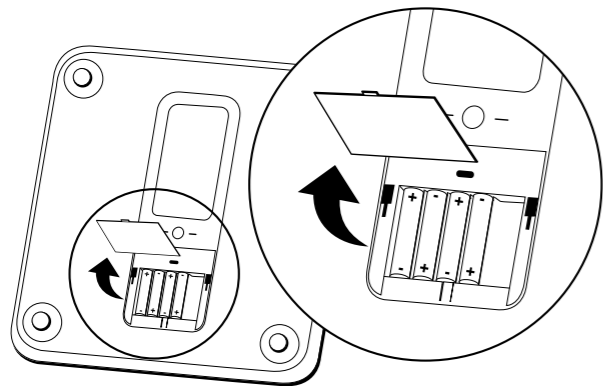

Att ansluta vågen till Internet

via ditt Wifi-nätverk

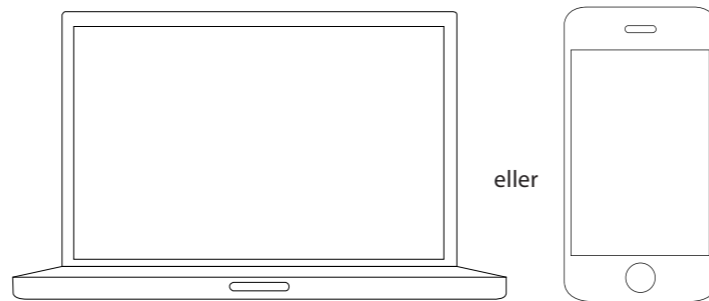


<http://start.withings.com>

Skriv adressen i adressfältet på din dators webbläsare eller Safari på din iPhone och följ anvisningarna.


Inställningar

Vid användning på en matta

Att ändra måttenhet på displayen:

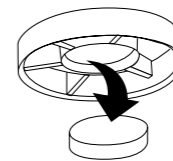

montera de medföljande
4 fötterna.

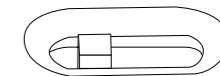

kg st lb

använd väljaren i batterifacket.

Frågor?

Råd om installation och användning av Withings våg finns online på:

<http://support.withings.com>