


VETEK



Personmått VHM210D

Manual och monteringsanvisning

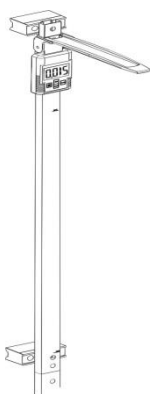

- Måttintervall: 100-210cm/3ft 31inch-6ft 10inch/39-83 inch
- Gradering 1mm – 1/16 inch
- Elförsörjning: 2 x 1,5V AAA
- Nettovikt: 1100 g
- Temperaturintervall: da +10°C a +40°C
- Dimension (BxLxD): 80x2140x50 mm

INDEX

1. KNAPPAR	SIDA 2
2. MONTERING	SIDA 2
3. INSTALLATION AV BATTERI	SIDA 3
4. MÄTNING	SIDA 3
5. KALIBRERING	SIDA 4
6. UNDERHÅLL OCH SUPPORT	SIDA 4
7. ÖVEREMSTÄMMELSE	SIDA 4
8. AVSKAFFANDE	SIDA 5






INTRODUKTION

Läs den här manualen ordentligt innan längdmåttet används

1. KNAPPAR


- ON / OFF** Tryck på ON/OFF för att starta/stänga av längdmåttet.
- UNIT** Välj enhet mellan cm, ft/inch och inch.
- HOLD** Tryck på hold för att spara ett värde under mätningen. Då kan måttstocken flyttas men samma värde visas fortfarande för en enklare avläsning.
- RESET** För att nollställa och kalibrera måste systemet nollställas.

2. MONTERING

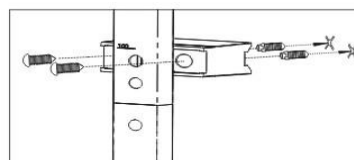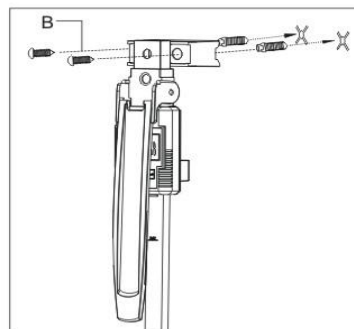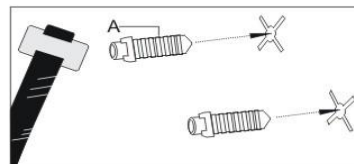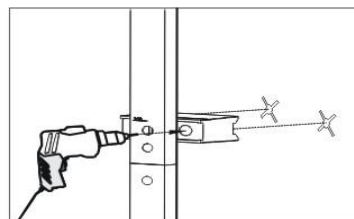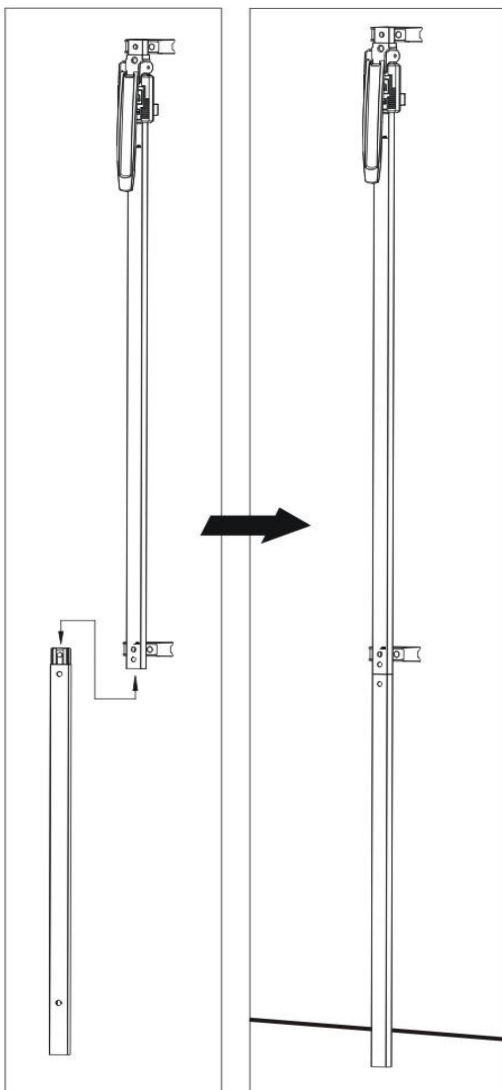

1. Sätt ihop de två delarna (se bild t.v.). När längdmåttet monteras till väggen, var försiktig och se till att den understa delen av längdmåttet sitter helt vågrätt så måttet inte hamnar snett och se till att det sitter på rätt höjd.
2. Håll längdmåttet mot väggen och markera var hållen är på väggen.
3. Ta bort längdmåttet och borra och sätt i plugg.
4. Återplacera längdmåttet mot väggen igen.
5. Skruva i skruvarna i pluggarna som redan sitter i väggen.


3. INSTALLATION AV BATTERI

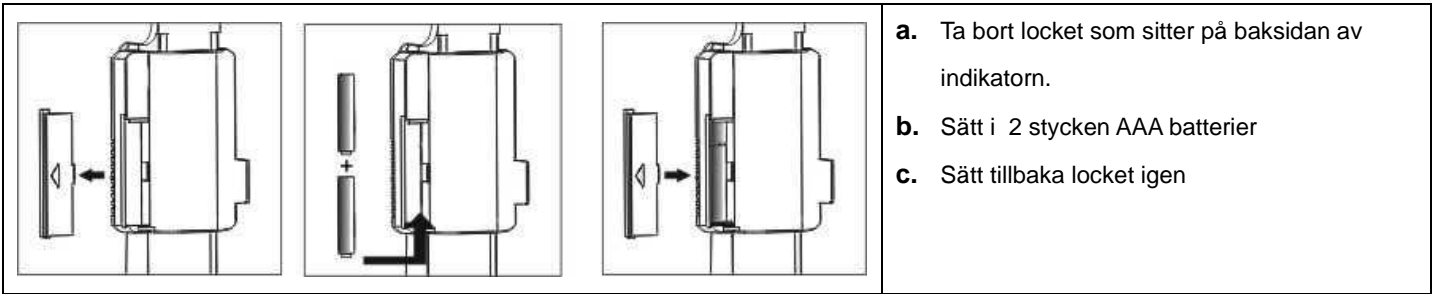

4. MÄTNING


Steg för en korrekt mätning

1. Tryck upp indikatorn så högt upp att personen som ska mätas får plats att stå under den.
2. Be personen att stå med ryggen mot längdmåttet
3. Dra ner indikatorn tills den nuddar huvudet.
4. Läs av längden på skärmen (använd Hold-funktionen för enklare avläsning, se rubrik 1, knappar)

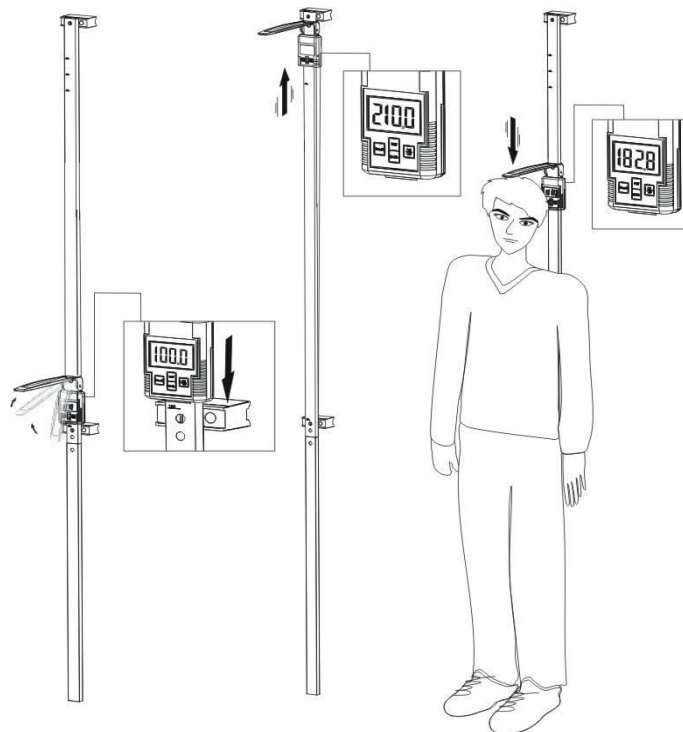

5. KALIBRERING

Placera indikatorn vid 100-sträcket. Slå på längdmåttet och håll in kalibreringsknappen (reset) tills 100.0 visas.

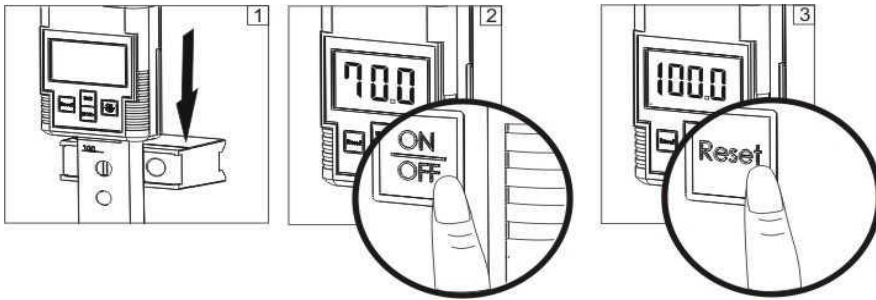

6. UNDERHÅLL OCH SUPPORT

- ♦ Vi rekommenderar att använda ett alkoholbaserat rengöringsmedel eller liknande för rengöring.
- ♦ Använd inte stora mängder vatten vid rengöring av längdmåttet, då det kan orsaka skada på elektroniken, du bör också avstå från att använda frätande vätskor och högtryckstvättar.

7. ÖVEREMSSSTÄMMELSE

MODEL WH-210D N° SERIAL.....



Manufacturer's Declaration of Conformity

This product has been manufactured in accordance with the harmonized European standards, following the provisions of the below stated directives:
Electro Magnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
Low Voltage Directive 2006/95/EC

only Medical Approval Scale is in conformity with
Medical Directive 93/42/EEC

FCC CLASS B Declaration of Conformity

This device complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules

FDA no.: D072478 / 3007074192

8. AVSKAFFANDE

Avskaffande  EU 2002/96/EC

Den här produkten överensstämmer med EU-direktivet 2002/96/EC. Den överkorsade soptunnan visar att den här produkten inte får kastas med vanliga hushållssopor, utan måste lämnas in på återvinningsstationer för elektronisk utrustning eller skickas tillbaka till återförsäljaren vid köp av en

ny ekvivalent produkt. Användaren är ansvarig för att produkten lämnas in på en lämplig återvinningsstation.

Återvinning hjälper till att förebygga negativa effekter på mark och miljö, och på mänsklig hälsa, och kan utgöra byggstenar för framtida produkter.

För mer detaljerad information om återvinningssystem som finns, kontakta din kommun eller återförsäljaren.

Som konsument är du enligt lag tvungen att återvinna batterier och inte kasta dessa i hushållssoporna. Du kan slänga batterierna i allmänna insamlingar för batterier, eller lämna in dessa hos vilken återförsäljare av batterier som helt som har en batteriinsamling.

Följande symboler visar förekomst av skadliga ämnen:

Pb Pb = batterier som innehåller bly; Cd Cd = batterier som innehåller kadmium; Hg Hg = batterier som innehåller kvicksilver



WARNING

Kasta inte elektriska delar eller batterier i hushållssoporna. Kasta batterier på en återvinningsstation.