

VETEK



Personvåg med räcke VRH-300

MANUAL



Read this manual carefully before using the instrument

INDEX


Vid upppackning av vågen bör du först se till att alla delar till vågen finns med i kartongen.

Undvik att ställa vågen på en plats med hög värme och vibrationer. Se även till att vågen står på ett stabilt och plant underlag.


Innehåll

1. Förberedelser
2. Indikator/knappfunktioner
3. Laddning
3. Inställning av tid/datum
3. "Hold" funktion
4. "Tare" funktion
4. Skrivar funktion
4. BMI funktion
5. Inställningar
5. Batteribyte



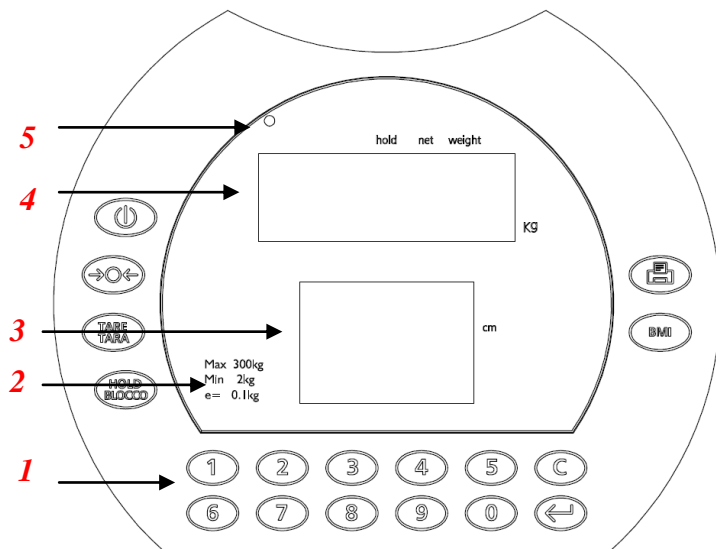




INDIKATOR



1. Knappanel
2. Vågens kapacitet och delning
3. Huvuddisplay
4. Andrahands display
5. Display, visar om vågen laddas

Knappar	Funktion
	On/Off knappen. Tryck på knappen för att strata vågen och håll in knappen i 3 sekunder för att stänga av vågen

Knappfunktion

	Indikerar att vågen är på nollläget (inom $\pm 2\%$ av kapaciteten)
	Lås skärmen på en vikt
	Räkna ut body mass index (BMI)
	Tare-funktion, för att ta bort oönskad vikt
	För att ta bort felaktiga inmatningar av siffror
	Enter, för att bekräfta
	Utskrivning av sparad data
0-9	Digitala sifvertangenter

Laddning

Om **Lo** visas i displayen, Se till att ladda vågen med adaptern som medföljde vågen.

Uttaget för adaptern finner du på baksidan av indikatorn.

Du bör ladda vågen minst var tredje månad, oavsett om den används eller ej. Om vågen stått förvarad över tre månader bör du låta vågen laddas ur helt och sedan ladda upp den helt. Det är då större möjlighet att vågen återställer sig till full kapacitet.




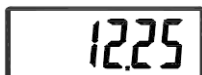

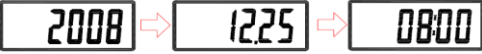
Uttag för adaptern

INSTÄLLNING AV DATUM OCH TID





Håll in knappen HOLD i 3 sekunder för att kunna ändra tiden.

Exempel: att programmera tiden till 25 December 2008, 8:00 a.m.





	Programmering av årtal: använd nummerpanelen för att skriva in årtalet, tryck sedan in HOLD för att komma vidare till nästa steg.
---	--

	Programmering av datum: använd nummerpanelen för att skriva in månad:dag, tryck sedan in HOLD för att komma vidare till nästa steg.
	Programmering av tid: använd nummerpanelen för att skriva in tiden, tryck sedan in HOLD för att komma vidare till nästa steg.
	Tidsformatet: ÅÅÅÅ → MM.DD → HH:MM

“Hold” funktion

Med hjälp av denna funktion kan du väga föremål/personer noggrant, även om personen är i rörelse. Du kan ha kvar vikten i displayen även när personen är utanför vågplattan. Starta vågen på  och vänta tills displayen visar 0,000 kg. Se till att föremålet/personen ställs på mitten av vågplattan. När vikten visas i displayen ska knappen  tryckas in. I detta läge kommer den lilla triangeln längst upp i displayen flytta sig till markeringen "hold" och det kommer även stå "hold" i displayen. Nu kan föremålet/personen tas av/kliva av från vågplattan och vikten kommer stå kvar i displayen. Du kan även trycka på  innan personen kliver på vågen. När personen sedan kliver på vågen registreras vikten. För att sedan återgå till normalt läge trycker man på  igen och du är tillbaka på startläge.

7.5 Tare-funktion

Tare-funktionen tillåter att användaren av vågen nollställer vikten på kläder t.ex. Detta gör att du lättare kan få ut den verkliga vikten på personen/föremålet som ska vägas. När  visas i displayen och vågen har pipit till två gånger, placera objektet (kläderna) på vågplattan. Tryck  efter att vikten på vågen stabiliserats och vikten i displayen är stabil. Vågen kommer sedan återgå till . Personen som ska vägas kan kliva på vågen (utan att ta bort kläderna). Den vikt som visas i displayen är personens nettovikt. För att ta bort det sparade "tare" värdet trycker du på  igen.

8. Skrivar funktion

Vikterna du väger kan skrivas ut med hjälp av en RS232-kabel.

Efter vägningen trycker du på  för att skriva ut resultatet.

Formatet som visas är standard format och kan inte ändras.

BMI funktion

<p>Tryck på BMI-knappen för att komma in i detta läge. I den nedersta displayen kommer den senaste inställda längden visas och den första siffran i raden kommer blinka.</p>	
<p>Med hjälp av de digitala siffrorna kan du skriva in längden på den person som ska vägas. Avsluta med </p>	
<p>Tryck på HOLD för att spara värdet. Kliv upp på vågplattan när displayen visar HOLD. Vågen kommer nu visa din vikt, längd och ditt BMI.</p>	
<p>Tryck på BMI för att gå tillbaka till normalt vägningsläge och ta bort sparandet av vikt.</p>	

Inställningar


Starta vågen och håll in TARE knappen i ca. 3 sek. Först visas "SETUP" i displayen och sedan "A.OFF".



AUTO-OFF TIME SETUP

Användaren kan genom denna funktion välja avstängningstid för enheten.

BUZZER ON/OFF SETUP

Användaren kan genom denna funktion välja om ljudsignalerna i vågen ska stängas av eller inte.

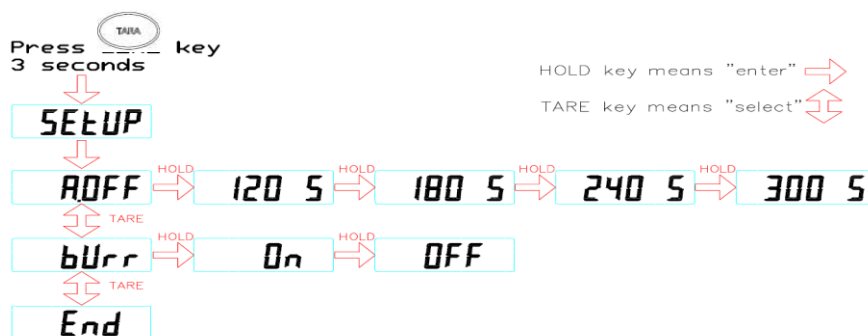

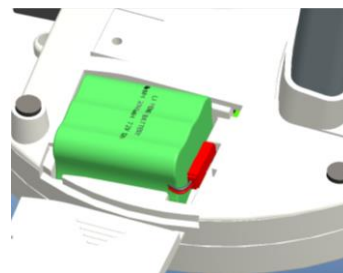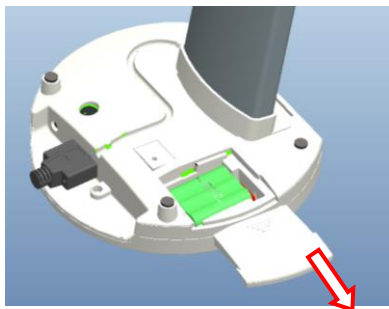Batteribyte

1. Öppna batteriluckan, ta ut batteriet.
2. Koppla bort det urladdade batteriet och ersätt den med ett nytt batteri. Se sedan till att kontakten hamnar på rätt plats igen.

OBS: För att färdigställa inställningarna tryck  när **End** visas i displayen.



OBS!

Kasta ej elektronik och batterier i hushållsavfall, sortera detta på närmaste återvinningscentral.

16. ASSEMBLY-USE MECHANICAL TELESCOPIC HEIGHT METER (OPTIONAL)




ATTENTION!


ONLY FOR COLUMN SCALE

HEIGHT ROD KIT



Picture 1: Assemble white metal support with abs black part white the screws (B+E). Lock all with the screws (D)

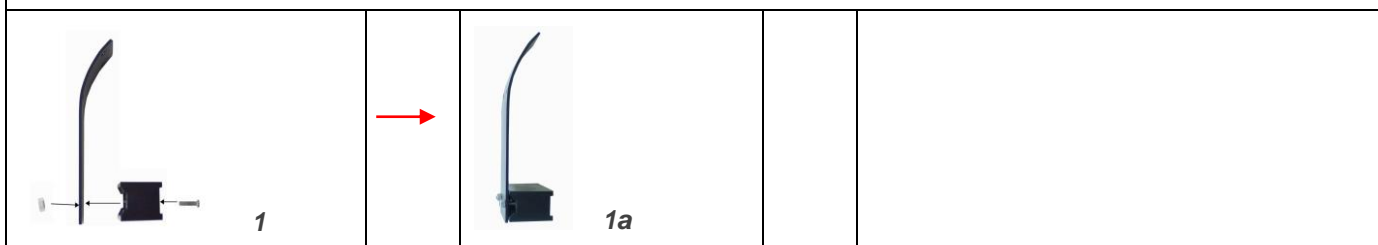



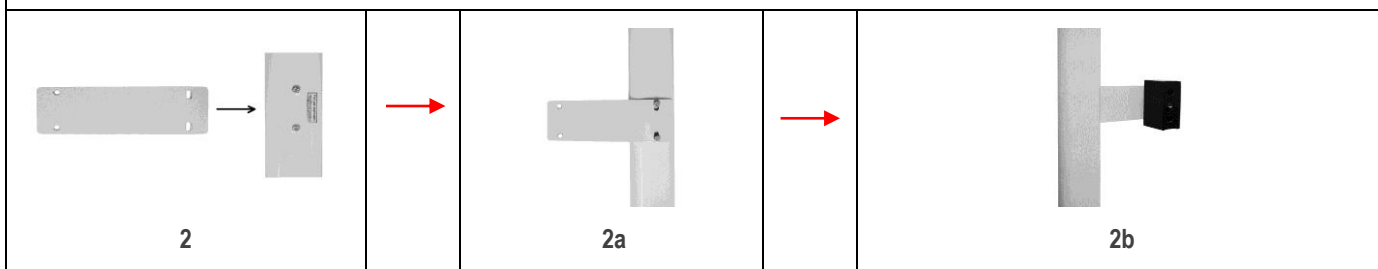


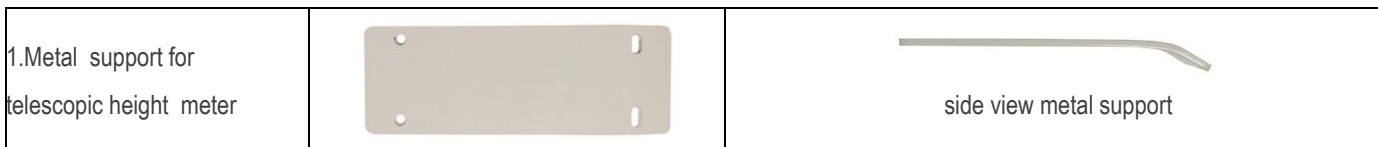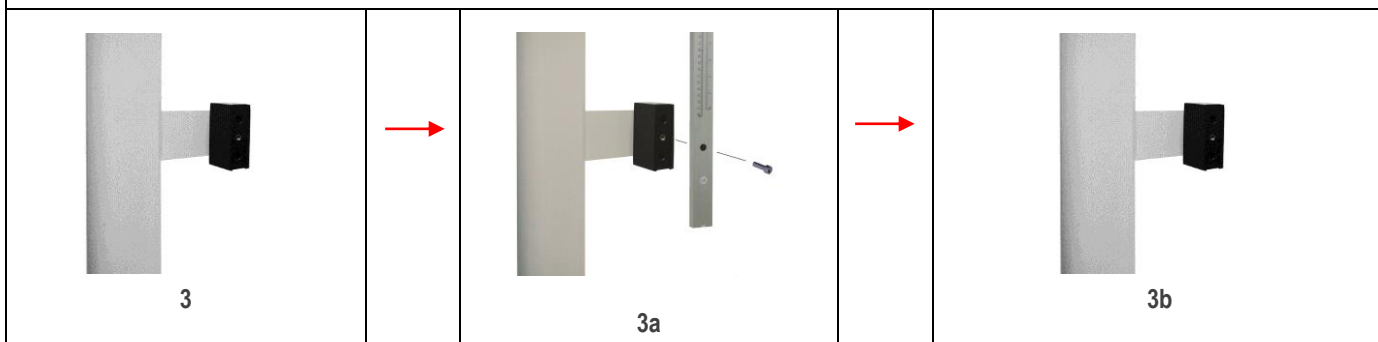


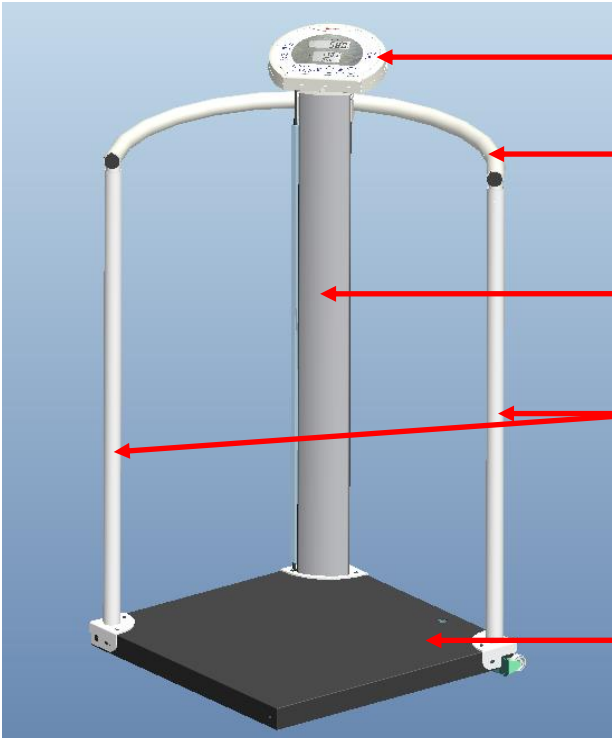
Picture 2-2a: behind the pole (column) assemble the white metal support with screws (B). Picture 2b: the position is on the right



Picture 3-3a: assemble the height rod on black abs support with screws (C) and allen tools kit Picture 3b: The height rod is ready for use.


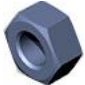


2. Black abs support height meter					
3.Screws	<p>A) </p> <p>N°02 screws T.E. (M5x16)</p>	<p>B) </p> <p>N°02 slotted screws (M5x25)</p>	<p>C) </p> <p>N°01 Allen Screws (M6x12)</p>	<p>D) </p> <p>N°02 nuts \varnothing 5</p>	<p>E) </p> <p>N° 02 washers \varnothing 5</p>
4.Tools	 <p>Tools</p>		 <p>Allen tools</p>		


<p>STAGES TO ASSEMBLY</p> <p>1. ASSEMBLY DISPLAY</p> <p>2. ASSEMBLY COLUMN</p> <p>3. ASSEMBLY LATERAL HANDRAIL</p> <p>4. ASSEMBLY CIRCULAR HANDRAIL</p>	 <p>Display</p> <p>Handräcke</p> <p>Pelare</p> <p>Pelare för handräcke</p> <p>Vågplatta</p>
--	--

17. THERMAL PRINTER (OPTIONAL)

 **Läs igenom instruktionen innan användning av skrivaren.**

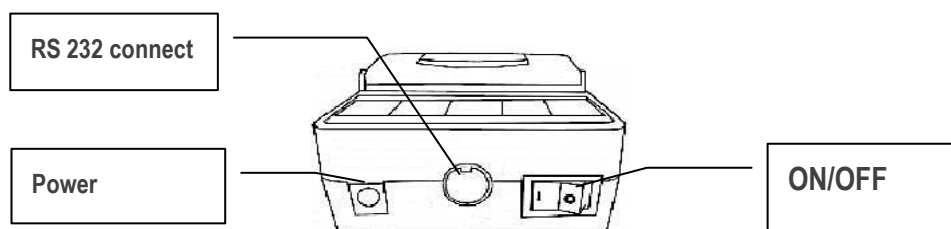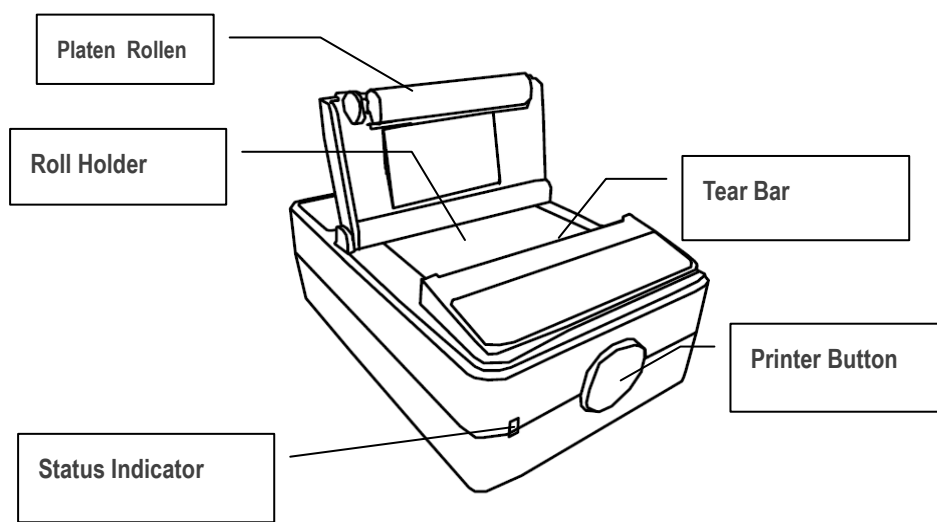


Koppla ihop AC adaptern och RS232 kabeln. Starta skrivaren på I/O knappen som sitter på skrivaren.

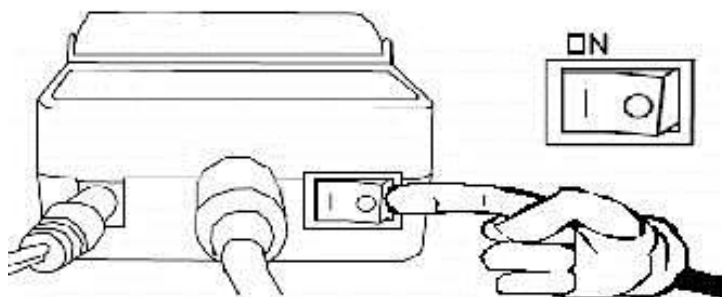

Skrivaren PRINTER XL kan kopplas ihop med RS232 kontakt

Tryck på PRINT knappen.

Print double language

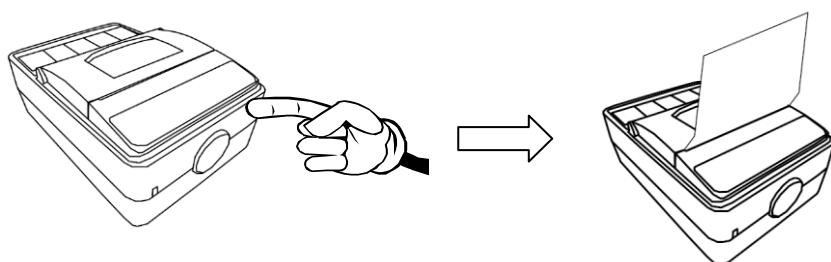


Byta pappersrulle

The paper print roll on a PRINTER XL printer is changed as follows:


1. Öppna den övre luckan på skrivaren och placera rullen så

den matar i rätt riktning.

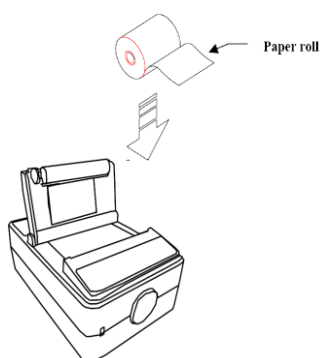


3. Dra ut änden genom luckan på skrivaren och stäng.

Skrivaren är klar.

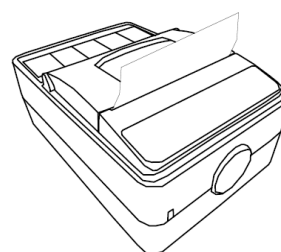

1 FAS: Montering av skärm

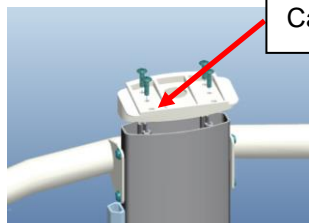


Cable display



Överst på pelaren finns en öppning och där ska kabelbrickan sitta.

Skruva fast brickan med fyra utav skruvarna som medföljer.

1A

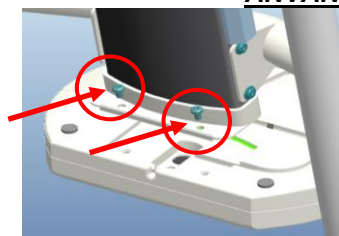


ANVÄNDARMANUAL

Skruva ihop displayen och pelaren med skruvarna som har måttet (m4x0,7*10mm).


2 ASSEMBLY COLUMN

2

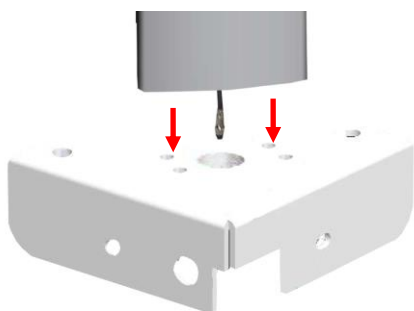

Ta den vita, kantiga metalldelen och för in kontakten från pelaren i det centrerade hålet. Skruva sedan ihop den vita metalldelen med pelaren.


2A

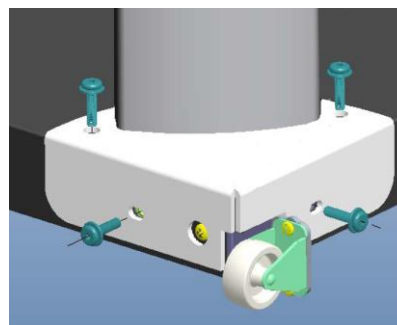

Placera metalldelen i hörnet på vågplattan, anslut kontaktarna till varandra och skruva sedan fast metallbiten med skruvarna som medföljer.


3 ASSEMBLY LATERAL HANDRAIL

3

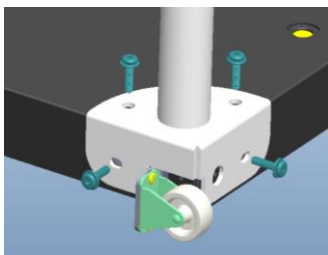




Skruva fast pelarna för handtagen på vågplattans hörn med hjälp av medföljande skruvar.

3A

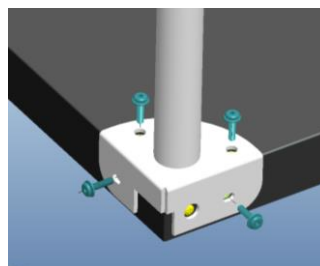

Gör likadant med det andra handtaget.

4 ASSEMBLY CIRCULAR HANDRAIL
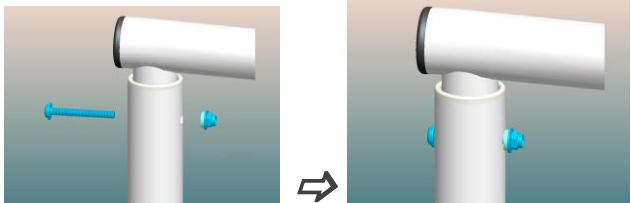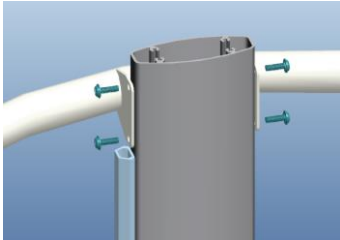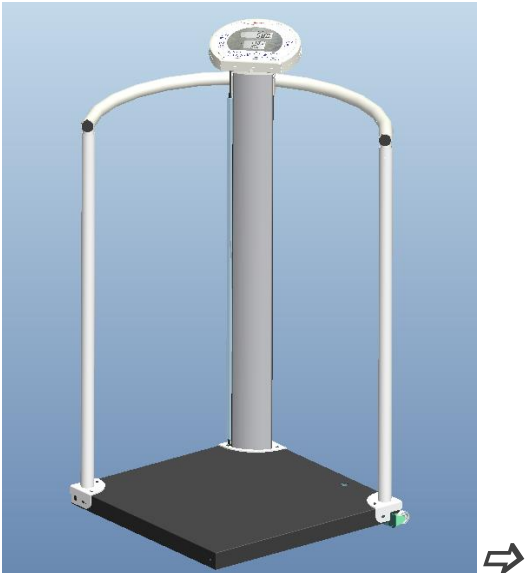
<p>4</p> 	<p>4A</p> 
<p>Sätt i de runda delarna på handtaget i pelarna och skruva fast dem.</p>	<p>Skruva fast handtaget med medföljande skruvar.</p>
	<p>Slutresultat!</p>

Varning för elchockar!



Skrivaren och strömförsörjning bör aldrig användas på en plats där den kan komma i kontakt med vätska. Detta kan leda till skador på användaren.






Pappersmateriel

Använd alltid pappersrullar av hög kvalitet.

Omladdning av pappersrulle

Om papperet tar slut i pappersrullen under utskrift, slå av strömmen och ladda om pappersrullen. Slå på och skriv ut igen.

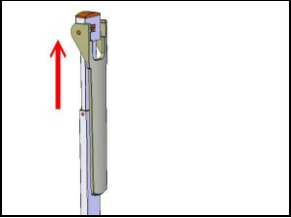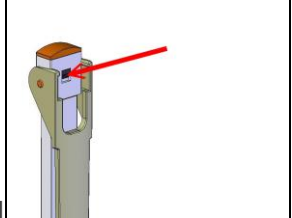MEASURING OVER 131 cm		MEASURING UNDER 130 cm	
 <p>1</p>	<p>Pull up the height meter rod</p>	 <p>1</p>	<p>Press the black button and measuring height and push down</p>

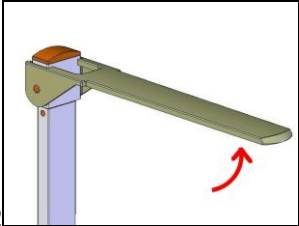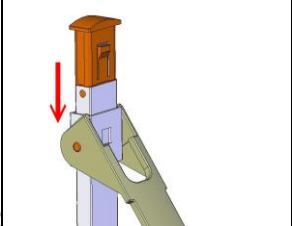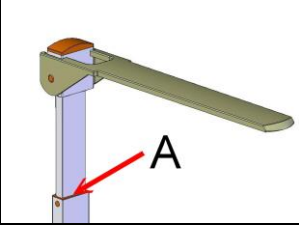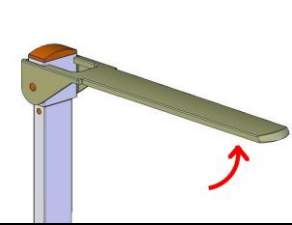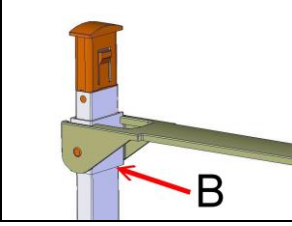 <p>2</p>	<p>Position it horizontally</p>	 <p>2</p>	
 <p>3</p>	<p>Lower the rod up to the point where the lever rests head touches the patient's head. The height can be read at the point 'A'</p>	 <p>3</p>	<p>Position it horizontally</p>
		 <p>4</p>	<p>Lower the rod up to the point in which the blade rests head touches the patient's head. The height can be read at point 'B'.</p>